



نکات مهم در کار با پروسسور EPK-i5000 پنتاکس

- این پروسسور باید با توجه به دستور العملها و شرایط عملیاتی توصیف شده در دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گیرد. عدم انجام این موارد منجر به خطر افتادن ایمنی کار و همچنین باعث آسیب دیدگی و یا خرابی پروسسور می گردد. لذا **قبل از هر کاری دفترچه راهنمای کار با پروسسور را به دقت مطالعه نمایید** و در صورت داشتن هرگونه مشکلی با واحد پشتیبانی پنتاکس به شماره تلفن ۰۲۱-۲۲۲۵۵۴۲۱ تماس حاصل نمایید.
- حتما برای پروسسور از استابلایزر با توان حداقل 2KVA استفاده کنید و هیچ سیستم دیگری را به این استابلایزر متصل ننمایید (مانند کولر و....) و برای ایمنی بیشتر پروسسور باید به اتصال گراند (اتصال زمین در تجهیزات الکترونیکی) متصل گردد.
- عمر لامپ این پروسسور ۵۰۰ ساعت می باشد.** همواره نشانگر عمر لامپ روی پنل جلو را قبل از کار بازمینی کرده تا در وضعیت سبز رنگ باشد و چنانچه قرمز شد حتما با واحد سرویس تماس حاصل نمایید.
- از روشن گذاشتن بی دلیل لامپ خودداری کنید و هرگز بطور مستقیم به نور آن نگاه نکنید.
- برای جلوگیری از هرگونه آسیب به پنل جلو پروسسور از تماس پنل با هرگونه اشیاء تیز و یا فشار هر شیء دیگر خودداری کنید.
- اجازه ندهید که کابل برق پروسسور پیچ خورده، خم شده و یا کشیده شود و اطمینان حاصل کنید که تمامی کابلها و اتصالات به درستی و ایمن متصل شده اند.
- تمام سطوح و کابل و لوازم جانبی و ... را با گاز استریلی که کمی مرطوب شده با الکل است تمیز نمایید.
- مطمئن شوید که دریچه های تهویه توسط مایعات، خیس و یا مرطوب نباشند و دریچه های هوای کنار پروسسور را هیچگاه مسدود نکنید.
- این پروسسور هرگز در محلهایی که در معرض نور مستقیم خورشید و همچنین دمای بالا، رطوبت، گرد و غبار و نمک و گازها و مواد شیمیایی قابل اشتعال یا منفجره و یا امکان حمل و نقل و یا لرزش و تکان وجود دارد نمی بایست نصب گردد.
- پس از اتصال آندوسکوپ به پروسسور اطمینان حاصل کنید که اهرم قفل کننده کانکتور محکم و ایمن قفل شده است.
- در زمان تعویض آندوسکوپ پروسسور را خاموش نموده و پس از نصب آندوسکوپ دوباره پروسسور را روشن کنید.**
- همواره بخش Brightness روی پنل جلو را کنترل نمایید تا نمایشگرهای آن در وضعیت Auto و Ave باشند.
- همواره مطمئن شوید که کلید shutter (در کی بورد پنتاکس با همین نام کلیدی روی صفحه کلید وجود دارد و در سایر کی بوردهای تجاری و استاندارد این کلید F5 است) در حالت OFF باشد چون اگر Shutter در وضعیت ON باشد میزان شدت نور بخصوص در عمق تصویر به شدت کم خواهد بود.

باتشکر

واحد خدمات پس از فروش